

# REAL SALIVA DNA SAMPLE COLLECTION

Sistema de recolección, transporte y estabilización de muestras de saliva.

Ref.RBMSAL01CE	1 unidad
Ref.RBMSAL100CE	100 unidades

## DESCRIPCIÓN

**REAL SALIVA DNA Sample Collection Kit** proporciona un procedimiento todo en uno rápido y seguro para la recolección, estabilización y transporte de muestras de saliva de 2 ml a temperatura ambiente.

Nuestra solución conservadora **REAL STOCK** se añade a la muestra de saliva obtenida y la mezcla es enviada al laboratorio para el posterior análisis.


Una vez que la muestra de saliva se mezcla con los 2 ml de **REAL STOCK** ésta se mantiene estable a temperatura ambiente durante 1 año e indefinidamente a  $-20/-80^{\circ}\text{C}$ . Se recomienda trasvasar la mezcla a un criotubo que soporte dichas temperaturas.

### Características

- Para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras de 2 ml de saliva.
- Elimina la necesidad de procesar inmediatamente la muestra.
- Permite un fácil transporte y manejo de la muestra a temperatura ambiente.
- Recogida de muestra indolora y no invasiva.
- Permite una recogida de muestra en cualquier lugar diferente del laboratorio.
- Permite una extracción de un ADN de excelente Calidad e integridad.
- Compatible con la mayoría de métodos de extracción de ADN. Se recomienda el uso de nuestro **DANAGENE SALIVA DNA KIT** para realizar el proceso posterior de purificación y extracción.
- Compatible con NGS.

## PRESENTACIÓN

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
RBMSAL100DANCE	RBMSAL01DANCE x 100 unidades

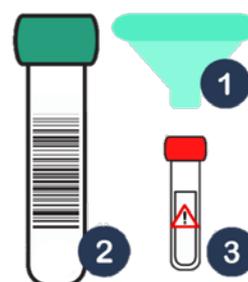

### Componentes por unidad de RBMSAL01DANCE:

COMPONENTE	REFERENCIA	PRESENTACIÓN	ALMACENAMIENTO
Solución conservadora Real Stock	RBMST02_DANCE	2ml x 1 unidad	Temperatura ambiente
Embudo colector	EMB	1 unidad	Temperatura ambiente
Tubo para recogida de saliva	TR5ML	1 unidad	Temperatura ambiente
Instrucciones de uso	-	1 unidad	Temperatura ambiente

### Material necesario no provisto:

- Reactivos para la posterior extracción de ácidos nucleicos.
- Reactivos para la posterior amplificación o cuantificación de ácidos nucleicos.

El kit debe ser almacenado a temperatura ambiente (10-30°C) hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Mantener en un lugar fresco y seco. Desechar siguiendo métodos específicos para la destrucción de material con contenido biológico. Consultar la legislación sobre la eliminación de sustancias tóxicas. Si no es posible, contratar una empresa autorizada para ello.


## PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE SALIVA

1. No comer, beber, fumar o masticar chicle al menos 30 minutos antes de la recogida de muestra. Es posible que se tarden varios minutos en obtener **2 ml de saliva**.



2. Introduzca el **embudo colector (1)** en el **tubo de recogida de saliva (2) ref. TR5ML**. Frotar las mejillas con la lengua y dientes para la estimulación de la secreción de saliva.

3. Recoger la saliva hasta **alcanzar el nivel de la línea de 2 ml**. Eliminar el exceso de burbujas dando golpes sobre una superficie dura. No se deben tener en cuenta en la medición.

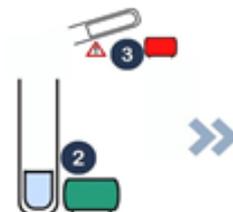


4. Retirar y desechar el embudo colector.

5. Quitar el **tapón rojo del tubo con la solución conservadora Real Stock (3) ref. RBMST02\_DANCE** y añadir todo el contenido en el tubo de recolección con los **2 ml de saliva**.

6. Cerrar firmemente el **tubo de recogida de muestra (2) ref. TR5ML** con su tapón verde.

7. Agitar con energía el tubo durante 15 segundos para mezclar bien la saliva con la solución conservadora. Evitar grumos de saliva sin disolver.

8. La muestra de saliva está ahora conservada y lista para su almacenamiento, envío y procesamiento.

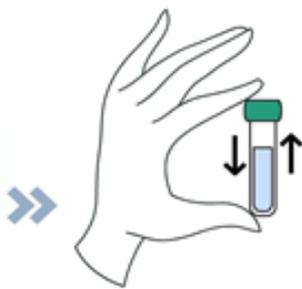

## AS Y PRECAUCIONES

- Mantener alejado de los niños.
- La solución conservadora contenida en el tubo de TAPÓN ROJO no debe ingerirse bajo ningún concepto.
- Lavarse las manos antes y después de la toma de muestra.
- En caso de ingestión accidental llamar al Instituto de Toxicología: Tif+34 91 562 04 20.
- No reutilizar. No utilizar si el embalaje está dañado.
- Mantener alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- No utilizar tras la fecha de expiración.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria.

## GUIA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Para cualquier duda o consulta adicional sobre el protocolo, puede ponerse en contacto con su proveedor.

## DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Número de catálogo		Código de identificación único
	Consultar instrucciones de uso		Límite de temperatura.
	Fecha de caducidad		No usar si el embalaje está dañado.
	Lote		Un solo uso, no reutilizar.
	Contiene suficiente para n pruebas		Advertencia
	Fabricante		Dispositivo médico de diagnóstico IN VITRO
	Marcado CE de conformidad		Mantener alejado de la humedad

Durviz S.L. Leonardo Da Vinci 10, 46980 Paterna, Valencia, España.  
Tel. +34 96 136 61 07 E-mail: durviz@durviz.com - Internet: www.durviz.com

